

# HOVSTIMULERING från Horsequality Sweden AB

Tack för att du valt just vårt material som ger ett underlag som stimulerar hoven till tillväxt.


**Viktigt!** En vind och sned hovkapsel växer vint och snett. **Balansera** hoven först - **stimulera** sen genom att promenera hästen 20 minuter dagligen med materialet på hovarna.



1. Låt hästen stå på materialet.



2. Rita av hovens kontur med tuschpenna. Hoven ger ett avtryck i materialet.

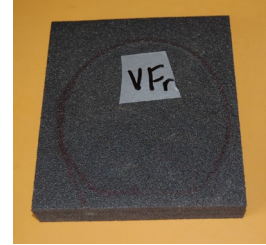


3. Justera kontur mot avtryck. Märk upp vilken hov det tillhör på sidan ska placeras mot hoven.



4. Skär ca 6 mm utanför markeringen så att materialet blir något större än hoven.



5. Förbered fastsättning på hoven: sätt fast silvertejp under materialet enligt bilden. Längden på tejp som sticker ut motsvarar hovväggens höjd.

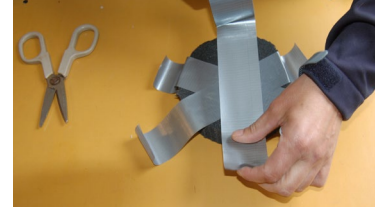

6. Lägg an och centrera materialet på upplyft hov. Vik ner silvertejpen och fäst mot hovväggen.



7. Fixera mot hovväggen med ett varv tejp så sitter materialet där det ska. Fortsätt tejpa runt om och neråt tills du får en kant att vika in under hoven. Klart!



Horsequality Sweden AB

kontakt@horsequality.se  
www.horsequality.se



**TIPS för återanvändning!** Låt silvertejpen sitta kvar som på bilden. Det skyddar mot nötning och det blir lättare att sätta på materialet nästa gång.